

Instruções de uso

ChemoSet[®]



ChemoSet[®]

IV Administration Set 0,2µm

Contém 01 unidade do equipo somente para infusão gravitacional

INDICAÇÃO DE USO:

Este é um equipo de infusão gravitacional indicado na infusão parenteral de medicamentos, cumprindo a função de conduzir o fluido contido no reservatório até o acesso vascular do paciente. Em função dos materiais de fabricação, ChemoSet[®] é ideal para infusão de paclitaxel. Produto de uso único.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Taxa de fluxo utilizando salina: aproximadamente 33 mL/min.
Taxa de fluxo utilizando paclitaxel: aproximadamente 11 mL/min.
Gotejamento: 20 gotas/mL

CONTRAINDICAÇÕES:

Não utilize com hemoderivados ou hemocomponentes.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Uso único. Não reesterilize. Antes do uso, verifique se não há vazamentos.
Não use se o dispositivo ou a embalagem estiverem danificados ou se a integridade da embalagem estiver comprometida ou após o vencimento do prazo de validade.
A perfuração do equipo ou da linha de infusão pode causar embolismo gasoso.
Antes de utilizar, verifique a compatibilidade e a estabilidade físico-química dos medicamentos com os materiais de fabricação do dispositivo.
Não se deve apertar a bolsa de soro pra preencher a linha de infusão.
Não use o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta. Nestes casos, NÃO é possível assegurar a esterilidade. Esterilização por óxido de etileno.

INSTRUÇÕES DE USO:

Aditivação da Dose

- Conecte totalmente a ponta seca da câmara de gotejamento do equipo de infusão na bolsa de soro.
- Preencha a câmara de gotejamento com o diluente.
- Preencha a linha de infusão devagar enquanto segura o filtro em posição mais elevada.
- Faça a transferência do fluido de acordo com o protocolo.
- Repita a etapa de preenchimento com medicamento o número de vezes necessárias para preparar a dose.

Infusão



- Para iniciar a infusão conecte o ChemoSet[®] ao dispositivo de acesso vascular, abra a pinça rolete e regule a taxa de fluxo de acordo com a necessidade.
- Antes de iniciar a infusão verifique a presença de bolhas de ar.
- Se forem observadas bolhas de ar, remova antes de iniciar a infusão.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Temperatura ambiente, local arejado, ao abrigo da luz e da umidade. Este é um produto estéril, de uso único, não devendo ser reprocessado.

DESCARTE:

Depois de utilizado, o produto deverá ser descartado de acordo com as legislações vigentes e as normas institucionais.

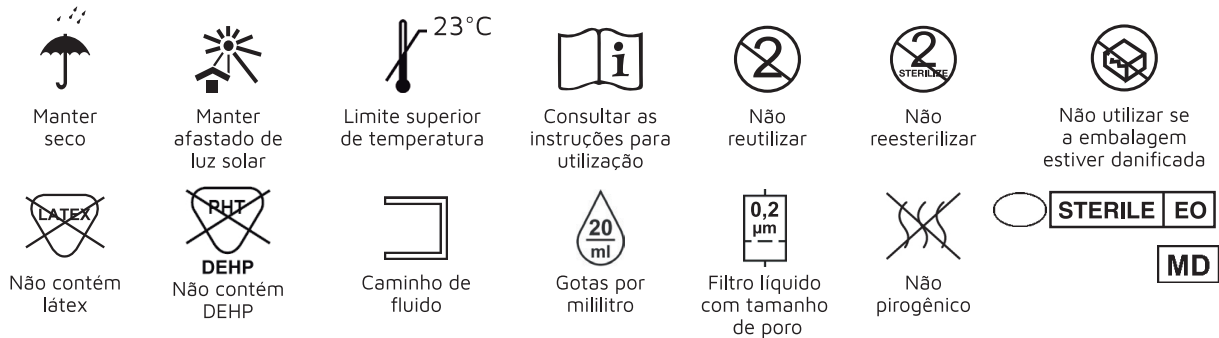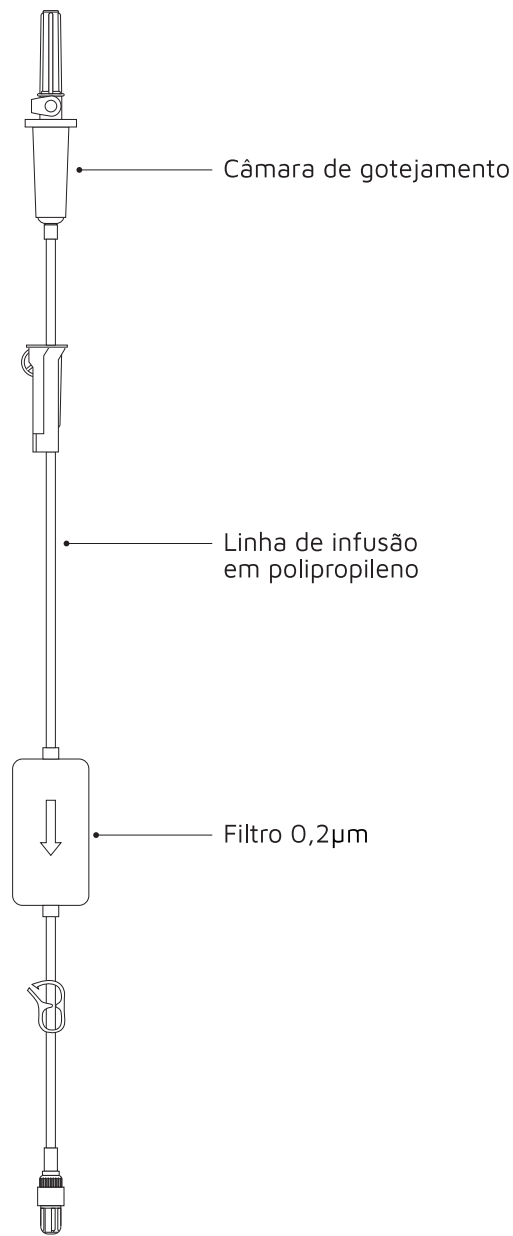

BMR Medical S.A. | BR 116, nº 1440, Km 1,4 - Campina Grande do Sul - Paraná - Brasil
 CEP 83430-000 | CNPJ 07.213.544/0001-80 | +55 (41) 3093-3900 | www.bmrmedical.com.br

Cadastro ANVISA: 80299880179

8.02.00007.03 20/10/2023