

Instruções de uso

CHEMOSET® ARISURE™

ADMINISTRATION SET 0,2 µm

ChemoSet® Arisure™

Administration Set 0,2µm

Contém 01 unidade do equipo somente para infusão gravitacional

ATENÇÃO:

Não use o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta. Nestes casos, NÃO é possível assegurar a esterilidade. Esterilização por óxido de etileno.

ARMAZENAMENTO:

Temperatura ambiente, local arejado, ao abrigo da luz e da umidade. Este é um produto estéril, de uso único, não devendo ser reprocessado.

INDICAÇÃO DE USO:

Este é um equipo de infusão gravitacional indicado na infusão parenteral de medicamentos, cumprindo a função de conduzir o fluido contido no reservatório até o acesso vascular do paciente. A válvula Arisure acoplada à câmara de gotejamento facilita a aditivação do medicamento. Em função dos materiais de fabricação o ChemoSet® Arisure™ é ideal para infusão de paclitaxel.

PRECAUÇÕES:

Uso único. Não reesterilize. Antes do uso, verifique se não há vazamentos.

ADVERTÊNCIAS:

Não use se o dispositivo ou a embalagem estiverem danificados ou se a integridade da embalagem estiver comprometida ou após o vencimento do prazo de validade.

A perfuração do equipo ou da linha de infusão pode causar embolismo gasoso.

Antes de utilizar, verifique a compatibilidade e a estabilidade físico-química dos medicamentos com os materiais de fabricação do dispositivo.

Não se deve apertar a bolsa de soro pra preencher a linha de infusão.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não utilize com hemoderivados ou hemocomponentes.

INSTRUÇÕES DE USO:

Aditivação da Dose

- Conecte totalmente a ponta seca da câmara de gotejamento do equipo de infusão na bolsa de soro.
- Preencha a câmara de gotejamento com o diluente.
- Preencha a linha de infusão devagar enquanto segura o filtro em posição mais elevada.
- Com o auxílio da seringa + OncoSafe® Arisure™ Closed Male Valve conectada à válvula OncoSafe® Arisure™ Neutral Valve no frasco do medicamento, retire a alíquota do medicamento a ser aditivada ao soro.
- Acople o conjunto seringa + OncoSafe® Arisure™ Closed Male Valve à válvula da câmara de gotejamento (compatibilidade ISO 80639).
- Faça a transferência do fluido de acordo com o protocolo.
- Desconecte o conjunto seringa + OncoSafe® Arisure™ Closed Male Valve da válvula da câmara de gotejamento.
- Repita a etapa de preenchimento com medicamento o número de vezes necessárias para preparar a dose.

Infusão

- Para iniciar a infusão conecte o ChemoSet® Arisure™ ao dispositivo de acesso vascular, abra a pinça rolete e regule a taxa de fluxo de acordo com a necessidade.

DESCARTE:


Depois de utilizado, o produto deverá ser descartado de acordo com as legislações vigentes e as normas institucionais.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Taxa de fluxo utilizando salina: aproximadamente 37mL/min.

Taxa de fluxo utilizando paclitaxel: aproximadamente 11mL/min.

Gotejamento: 20 gotas/mL

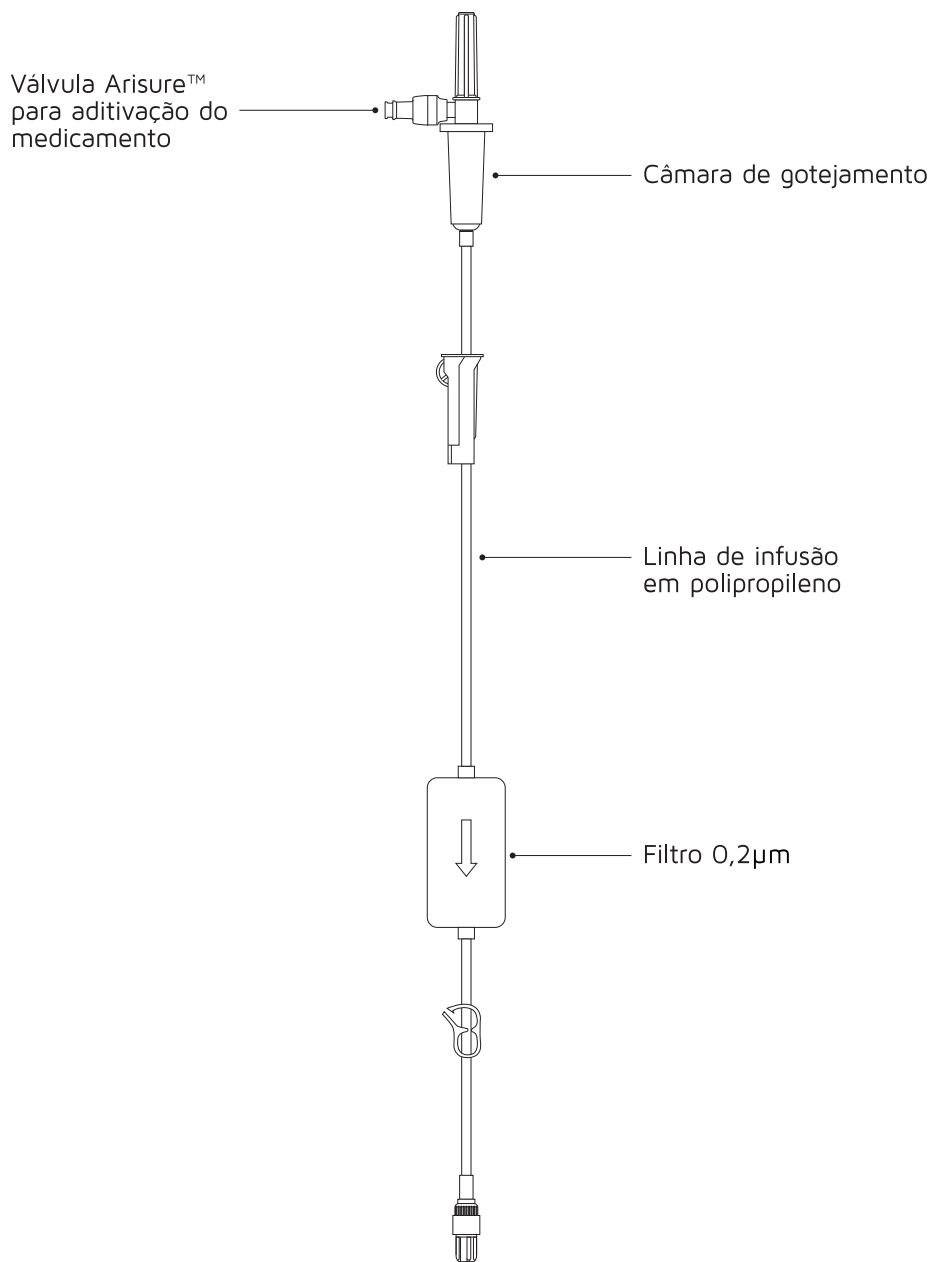

Manter seco



Manter longe do calor



Ver instruções de uso



Não reutilizar



Não reesterilizar



Não contém látex



Não contém DEHP



Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Chemoset®
Arisure™
Administration
Set 0,2µm
6.21.100001

Produto de uso único

STERILE EO

BMR Medical Ltda. | BR116, n° 1440, Km 1,4 - Campina Grande do Sul - Paraná - Brasil
CEP 83430-000 | CNPJ 07.213.544/0001-80 | +55 (41) 3093-3900 | www.bmrmedical.com.br

Farmacêutica Responsável Técnica: Patricia Zancanella CRF-PR 13.683

Cadastro ANVISA: 80299880178

8.02.00020.00 10/09/2020