

Instruções de uso

ivKIT[®]

ACESSO PERIFÉRICO


PUNÇÃO GUIADA




ivKIT[®]
ACESSO PERIFÉRICO




01
Higienize as mãos

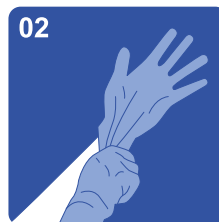


02
Coloque as luvas estéreis

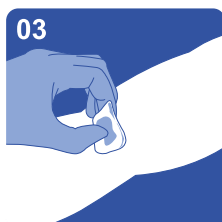

03
Faça a antissepsia da pele e descarte as luvas

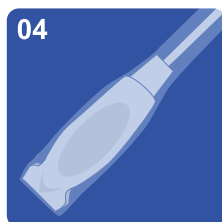


04
Calce o segundo par de luvas e prepare o transdutor

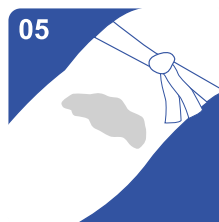


05
Aplique gel sobre a pele e prenda o garrote



06
Identifique o vaso

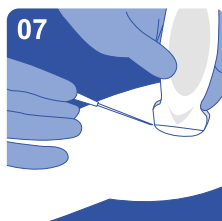


07
Realize a punção, observando o retorno venoso

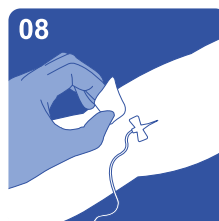

08
Aplique o protetor cutâneo



09
Consulte no verso a aplicação adequada do seu curativo

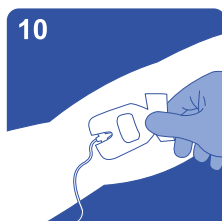

10
Aplique a estabilização / cobertura



11
Realize o flushing



Manter seco



Manter longe do calor



Não contém látex



Proibido reprocessar



Não reesterilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada




Não contém DEHP

STERILE EO

8.02.00019.00
04/06/2020

OncoDerm® sem Fenestra

IMPORTANTE: Aplique o protetor cutâneo SafeNSimple™ e aguarde pela secagem completa.

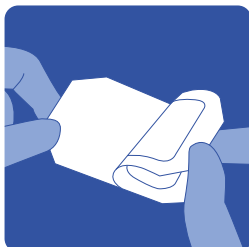

Remova a camada protetora




Posicione e aplique o curativo




Remova a borda do curativo

OncoDerm® Fenestrado

IMPORTANTE: Aplique o protetor cutâneo SafeNSimple™ e aguarde pela secagem completa.

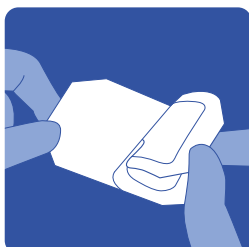

Remova a camada protetora

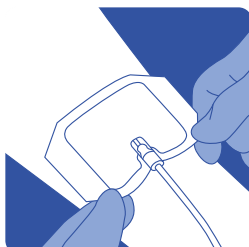


Posicione e aplique o curativo




Remova a borda do curativo

Securis™


IMPORTANTE: Aplique o protetor cutâneo SafeNSimple™ e aguarde pela secagem completa.

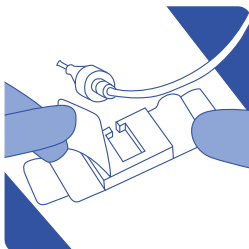

Aplique a base

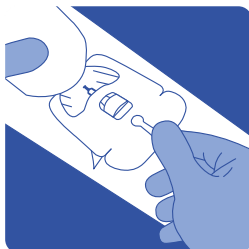

Aplique o curativo

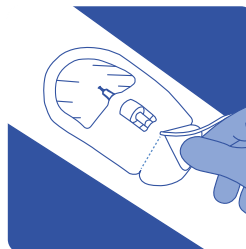

Cruze as abas sob o conector luer